



Villa Manus

Käsiterapia

***Dynaamiset osat
lastoihin ja ortooseihin***

DYNASYST - ORFITUBE™

Kun haluat valmistaa huippulaatuisen dynaamisen lastan yksilöllisesti.

ORFITUBE™n avulla saat juuri dynaamisen lastan vedon juuri sinne minne haluat- ja tarkasti. Putki on muotoiltavissa kylmänä haluttuun muotoon. Putki kiinnitetään lastaan kiinnittimellä joka mahdollistaa putken asennon muutokset vielä jälkeenkäynnin. Putken kiinnitys pitimessä yhdellä kuusiokoloruuvilla. Putkenkiinnitin kiinnitetään lastaan kuten muovi-muovi liitos. Et tarvitse niittejä / ruuveja tms. lämmitä liitettävät pinnat kuumailmalla ja paina ne vastakkain. Metallinen päätyholkki tuo lastaan viimeistellyn ulkonäön ja suojaa kuminauhaa hiertymiseltä. ORFITUBEN ansiosta lastan kuminauhanosuus on mahdollisimman pitkä, hyödyntäen kevyen elastisuuden.



ORFITUBE KIT

Sisältää: 10 putkea ja 2 taivutuslankaa, 3 erivahvuista elastista lankaa sekä yhden rullan siimaa.




ORFITUBE Taivutustyökalu

Tekee putkien taivuttamisen entistäkin helpommaksi ja tarkemmaksi



ORFITUBE Putkenkiinnitin


Pakkaus sisältää 5 kiinnitintä ja yhden 6kuusioavaimen

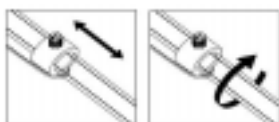


ORFITUBEN KÄYTTÖ

(Tarkemmat ohjeet pakkauksessa!!)



Suunnittele lasta. Ennen putken taivutusta laita sen sisään taivutuslanka

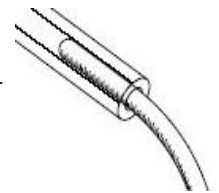

Taivuta putki halutuista kohdista, siirrä taivutuslankaa työn edessä. Taivutukseen voit käyttää myös työkalua 35308. Lopuksi poista taivutuslanka

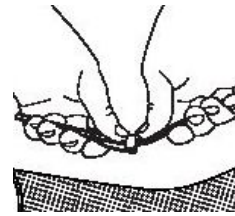


Sovita lastaan, tarkista kiinnityskohta ja pituus. Pujota kiinnitin paikalleen

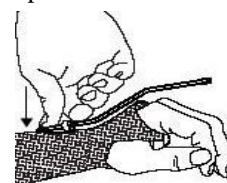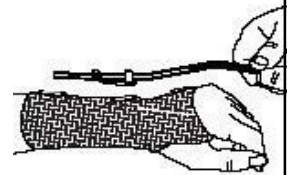

Kuumenna kiinnitettävät pinnat ja paina kiinnitin lastaa vasten

Leikkaa putki sopivan mittaiseksi ja laita päätyholkki paikoilleen

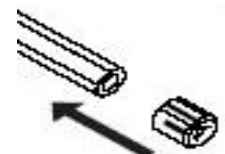

Viimeistele sopivalla elastisella langalla ja sormilennkillä



ORFITUBES

Pakkaus: 10 putkea ja 2 taivutuslankaa

ORFITUBES ENDS

Pakkaus: 20 päätyholkkia



ELASTISET LANGAT

nro 1. n. 200 gr, nro 2. n. 400 gr
nro 3. n. 600 gr ja joustamaton siima

KIT Single Orfitube Adjuster

Pakkaus: 5 putkea, 1 taivutuslanka,
5 päätyholkkia, 5 kiinnitintä ja 6k-avain



DYNASYST - Springs




JOINT JACK COIL SPRING

Sormilastoihin
Pakkaus: 10 kpl

WRIST EXTENSION COIL SPRING

Avustaa ranteen ojennuksessa
Pakkaus: 5 oikeaa + 5 vasenta

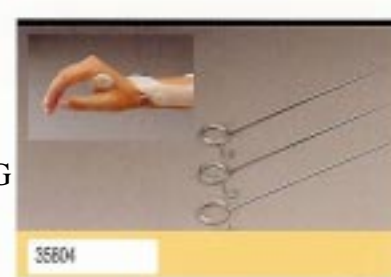

KNUCKLE BENDER COIL SPRING

Avustaa heikkoja insinric lihaksia
esim. Ulnarishieron vaurio
Pakkaus: 10 kpl

WRIST EXTENSION COIL SPRING

Materiaalipakkaus rannetta ojentavaan lastaan
sisältäen muovit ja jouset (2 kpl)



FINGER EXTENSION ASSIST

Avustaa sormien ojennuksessa
esim. Radialis pareesi, ojentajajännevammat
Sopii lasta-aihiin 35818-35822
Pakkaus: 10 kpl

STEINLESS STEEL SPRING WIRE

Ruostumatonta terästä, jousien valmista-
miseen. Paksuus 1mm, 15 metrin kieppi



Nivelet ekstensio / fleksiorajoittimella



Metallia, säätö kuusiokoloruuveilla
nro 70836 Ranne 16,2cm (6^{3/8}")
" 510556 Kyynärpää 35,5 cm (14")

Metallia, säätö nappuloilla valmiisiin reikiin
nro 77888 Lyhyt versio 26,7 cm (10^{1/2}")
" 77889 pidempi versio 39,3 cm (15^{1/2}")