

## ALLFIT™ - MUOVIRAKEET



Paksunnokset ja otteenparannus  
ALLFIT™ rakeilla.

Helppokäyttöinen,  
uudelleenmuotoiltavissa.

Tuote nro 703011 Allfit muovirakeet 6 pussia / laatikko

Saatavilla myös pusseittain 500gr / pussi



Lämmitä rakeet kuumassa  
vedessä kunnes ne  
muuttuvat läpinäkyviksi



Lämmin massa on pehmeä  
ja muotoiltavissa



Muotoile haluamallasi tavalla  
esim paksunnokseksi



# PASTASIL -

## kaksikomponenttisilikoni

**Käyttötarkoitus:** Arvenhoitoon, paksunnoksiin / lastoihin tms.

**Ominaisuuksia:** Helppo käsitellä, ei jäämiä käsiin silikonia sekoitettaessa  
Kovettuu haluttuun muotoon  
Kovettuneeseen silikoniin voidaan lisätä uutta massaa

**Tuotetietoja:** tuote nro 85H11-1, väri beige  
pakkauskoko 1 kg (500 + 500 gr)  
suositellaan säilytystä viileässä / jääkaapissa

**Käyttöohje:**

- 1- Ota molempia massoja keskenään määrällisesti yhtä paljon
- 2- Sekoita massat keskenään, kunnes väri on sekoittunut tasaiseksi
- 3- Muotoile haluamaasi kohteeseen / muotoon
- 4- Anna silikonin kovettua. Kovettumisaika riippuu sekä massan että ympäristön lämpötilasta
- 5- Kun massa on kovettunut on muotoiltu tuote valmis. Kovettuminen jatkuu mikrotasolla tunteja joten älä altista massasta tehtyä tuotetta tuotetta litistymiselle tms ulkoiselle voimalle.
- 6- Tarvittaessa voi massasta valmistettua tuotetta leikata tai hioa pienemmäksi.

**Hoito-ohje:** Käsienpesu vedellä ja saippualla tarpeen mukaan

Mikäli valmistamasi tuote tarvitsee paksuntamista tms koon kasvattamista voidaan se toteuttaa lisäämällä massaa jo kovettuneen aiemmin muotoillun tuotteen päälle:

- 1- Puhdista aiemmin muotoiltu tuote vedellä ja saippualla, kuivaa hyvin.
- 2- Puhdista kohta johon massaa lisätään esim asetonilla rasvan poistamiseksi
- 3- Valmista uusi annos massaa ja lisää edellisen päälle, paina napakasti
- 4- Muotoile ja anna kovettua
- 5- Uusi massa pysyy entisen päällä ja kestää normaalia kulutusta. Vältä liitoskohdan repimistä / vääntöä, sillä kerrokset saattavat irrota toisistaan kun niihin kohdistuu suurehko vastakkaisuuntainen voima.



1-2



3-4



5-6

## VENTAPAD- POTILASALUSTA

(tunnetaan myös nimellä karva-alusta, painehaavaumakarva, reuma-alusta sekä lampaan karva)



Makuualustat valmistetaan erikoiskuidusta (polyesteri) joka on tarpeeksi paksua ja jäykkää kannattamaan kevyttä painoa siten, että makuualusta on ilmava. Kuidut ovat sellaiset, etteivät ne anna bakteereille kasvualustaa ja tämä vähentää ihon tulehdusriskiä.

Keinokarvaa käytetään lyhytaikaisessa käytössä paineen kevennykseen (pehmeä ja ilmava alusta verrattuna tiiviiseen lakanakankaaseen). Karva on myös hyvä apu henkilöille jotka kaipaavat lämpöä esimerkiksi huonon verenkierron, hermovamman tai nivelsairauden vuoksi.

### Hoito-ohje:

Käyttöönottaessa uusi karva-alusta on se hyvä harjata, puistella tms. sillä leikkauspinoille on saattanut jäädä irtokarvaa. Oikein hoidettuna alusta säilyttää kuohkeutensa pesusta toiseen (konepesu ja **kuivana harjaus kuohkeaksi**). Valkoinen kestää sairaalapesun 90-95 astetta, P-pesu, rumpukuivaus, ei valkaisua eikä silitystä. Värillisten pesu 40 asteessa.

Saatavilla kovapohjaisena (jäykempi ja painavampi 1300g/m<sup>2</sup>) Värinä valkoinen, erillistilauksesta myös muita värejä.

tuote nro	10183	koko	70 x 60cm
	10184		70 x 100cm
	10185		70 x 140cm
	10187	metritavarana 150cm leveänä.	