

Silikoninen “klipsi” korvakeloidin hoitoon

Korvanipukan alueen paine- ja silikonihoidoon valmis klipsi. Klipsin päälimateriaali on silikonia. Silikoniosan tulee olla suurempi kuin hoidettava arpi sekä klipsin etu- että takaosasta.

Käytä klipsiä mahdollisimman monta tuntia vuorokaudessa. Totuttele klipsin käyttöön vähitellen. Pidä ensin vaikka 2 tuntia ja sitten tauko, toiset 2 tuntia jne. Mikäli käyttö sujuu hyvin, lisää käyttöaika vähitellen terapeutti yksilöllisten ohjeiden mukaan.

Aluksi paine tuntuu suuremmalta heti klipsin pukemisen jälkeen. Tunne lievenee hetken käytön jälkeen. Mikäli näin ei ole, varmista, että klipsi on oikein puettu ja kohdallaan.

Pukeminen: vie klipsin takaosa korvaan hieman aiottua ylemmäksi. Liuta kunnes kaareva rusto-osa loppuu. Sulje klipsi. Tarkista ettei etuosan rusto jää etureunan alle.

Huolto: Klipsin voit puhdistaa pyyhkimällä koskealle liinalla ja tarvittaessa desinfioivalla pyyhkeellä tai pestä vedellä ja neutraalilla saippualla.

Klipsin korvaan aiheuttama paine on sopiva silloin kun klipsi “tuntuu”, mutta ei aiheuta kipua. Jos klipsi on liian löysä (tippuu pois) tai liian tiukka (aiheuttaa kipua lyhyen pitoajan jälkeen) ota yhteys hoitavaan terapeuttiisi.

Mikäli sinulla on ongelmaa tai kysyttävää hoidostasi, ota ensisijaisesti yhteys toimintaterapeuttiisi

